

Hinweis: Dies ist lediglich eine Kurzanleitung. Lesen Sie zusätzlich vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam die Bedienungsanleitung.

Was ist was?



Quickstart

Als Erstes stellen Sie bitte die **Wasserdurchflussmenge** wie folgt ein: ca. 15 ml/Min. (in Tropfenform; am Turbinenschlauch bzw. an Ihrer Einheit einzustellen und zu regulieren). Der **Luftdruck** an Ihrer Einheit sollte zwischen 3-4 bar betragen.



Den Pulverbehälter 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Handstück nehmen. (Bild 1-3)




Deckel des Pulverbehälters gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen, abnehmen und mit dem von SATELEC empfohlenen Pulver befüllen (Bild 4-6). Höchstfüllstand (Markierung „MAX“/Einkerbung) dabei keinesfalls überschreiten (Bild 7).



Pulverbehälter verschließen (Drehung im Uhrzeigersinn) und wieder in das Handstück setzen und einrasten (mit einer 90° Drehung im Uhrzeigersinn) (Bild 8-10). Das Handstück an den Turbinenschlauch anschließen (Bild 11). Sie können jetzt mit der Behandlung beginnen.

Nach der Behandlung

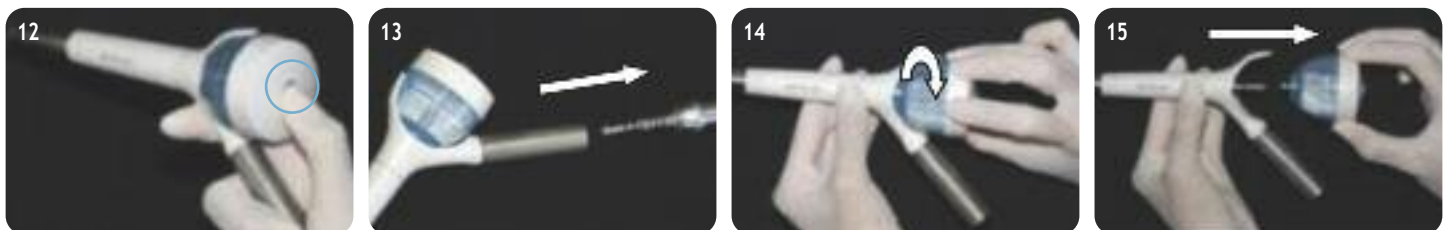

Am Ende der Behandlung oder vor dem Sterilisieren drücken Sie am Behälterdeckel auf „STOPP PULVER“ und betätigen Sie gleichzeitig den Fußschalter der Behandlungseinheit, um das Luftsystem zu entleeren (Bild 12). Das Handstück vom Turbinenschlauch trennen (Bild 13). Den Pulverbehälter 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus dem Handstück nehmen (Bild 14-15). Pulverbehälter öffnen und restliches Pulver komplett entfernen.

Was ist grundsätzlich zu beachten?

- Wasserdurchflussmenge sollte ca. 15 ml/Min. betragen (in Tropfenform) und ist am Turbinenschlauch bzw. an Ihrer Einheit einzustellen und zu regulieren
- Der Luftdruck sollte zwischen 3-4 bar betragen
- O-Ringe bitte regelmässig überprüfen, reinigen und pflegen. Bei Verschleißerscheinungen unbedingt austauschen! Nur O-Ringe in einwandfreiem Zustand gewährleisten reibungsloses Arbeiten mit dem AIR-N-GO.
- Zur Pflege der O-Ringe benutzen Sie bitte ausschließlich medizinisches Silikonspray, keine Vaseline!
- Befüllen Sie den Pulverbehälter keinesfalls über den Höchstfüllstand (Markierung „MAX“/Einkerbung - siehe Bild 7)!
- Zerlegen Sie regelmäßig das Handstück (gemäß Bedienungsanleitung) und reinigen Sie alle Teile im Ultraschallbad, um etwaige Pulverreste auch an unzugänglichen Stellen zu entfernen.
Vor erneutem Gebrauch trocknen Sie alles sehr gründlich ab!

Was ist nach der Behandlung zutun?

Nach jeder Benutzung sollte die Düse sterilisiert werden und alle Komponenten des AIR-N-GO überprüft werden

- Am Ende der Behandlung oder vor dem Sterilisieren drücken Sie am Behälterdeckel auf „STOPP PULVER“ und betätigen gleichzeitig den Fußschalter der Behandlungseinheit, um das Luftsystem zu entleeren.
- Das Handstück vom Turbinenanschluss **VOR** dem Reinigungs-/Desinfektionsverfahren trennen.
- Den Pulverbehälter aus dem Handstück nehmen, Pulverbehälter öffnen und restliches Pulver komplett entfernen (z.B. in das Speibecken der Behandlungseinheit oder in das Becken im Sterilisationsraum).
- Etwaige Pulverreste am Bajonett, am Gerät und im Pulverbehälter mit Druckluft/Desinfektionstuch immer entfernen
- Zwecks Reinigungs-/Desinfektionsverfahren Gerät zerlegen



Alle Teile lassen sich auch im Ultraschallbad reinigen (ca. 10 min.)

