



1

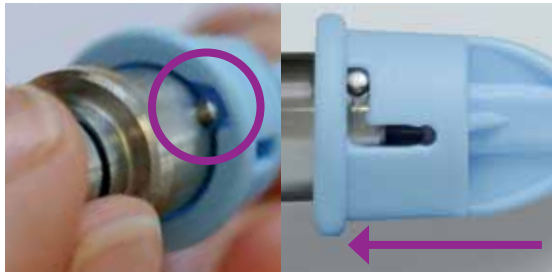


RISKONTROL-Ansatz auf den Adapter aufstecken. Hierbei ist zu beachten, dass der Ansatz entsprechend der Einkerbung passend aufgesteckt wird.

2

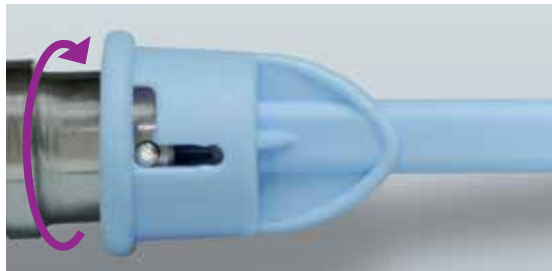

RISKONTROL-Ansatz leicht drehen...

3

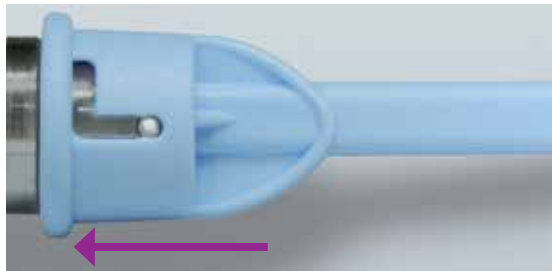

...und auf den Adapter schieben. Der RISKONTROL-Ansatz ist nun fest auf den Adapter gesteckt.

(Ggf. den einwandfreien Halt des Ansatzes mit einem Test unter Luftdruck prüfen.)

Pflegehinweise

Allgemein:

Damit Ihre Multifunktionspritze mit dem Adapter einwandfrei funktioniert, sollte der Luft- bzw. Wasserdruck mindestens 3,5 bar betragen. Die Differenz zwischen Luft- und Wasserdruck darf nicht mehr als 1 bar betragen.

O-Ringe:

- Vor dem Aufstecken des Adapters O-Ringe mit etwas Vaseline oder Silikonöl einreiben, dann bleiben die O-Ringe geschmeidig. Ca. 1x monatlich wiederholen
- O-Ringe regelmäßig kontrollieren, wenn notwendig wechseln
- O-Ringe des Adapters vor dem Sterilisieren oder der Reinigung im Ultraschallbad entfernen, da diese sonst porös werden können

Adapter:

- Adapter nach Gebrauch stets spülen und trocken halten. Ca. alle 6 Monate im Ultraschallbad reinigen, um Verunreinigungen vorzubeugen
- Adapter ausschließlich mit original RISKONTROL-Ansätzen verwendbar



Flexibel und biegsam:

Der RISKONTROL-Ansatz kann nach den Bedürfnissen des Anwenders individuell gebogen werden, um so selbst schwierige Stellen zu erreichen.