


AIR-N-GO REINIGUNGSHINWEISE „PERIO“


1 - Tröpfchenweise Anpassung des Sprays und Spülung der Leitungen ohne Pulverbehälter

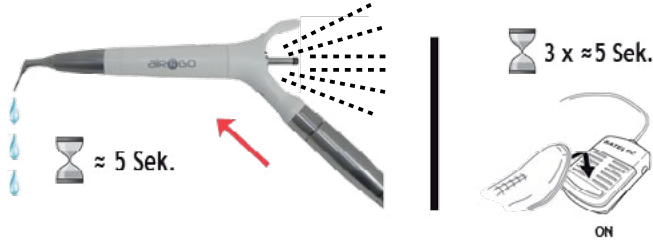

2 - Pulverbehälter und Deckel leeren und mit einem trockenen Tuch säubern




3 - Gewinde kontrollieren und reinigen

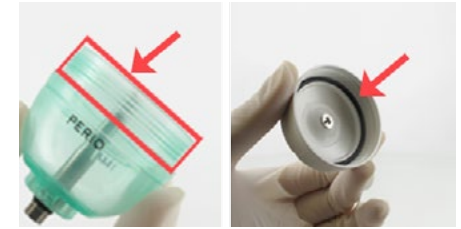

4 - Zustand des Behälters überprüfen




5 - Pulverrückstände mit Luftspritze und Reinigungssonde entfernen

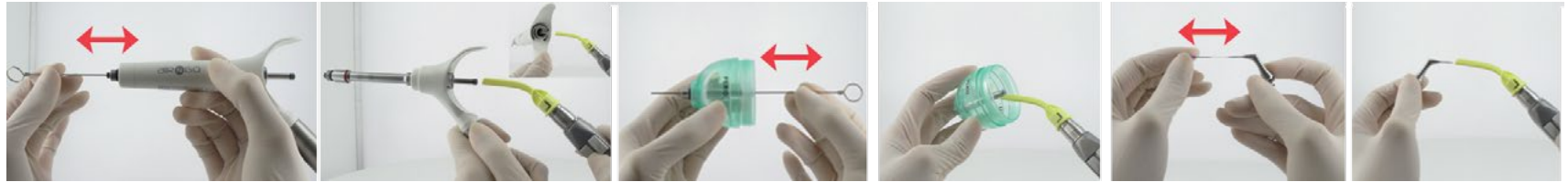

6 - Zustand und Sitz des O-Rings kontrollieren



7 - Sterilisation aller Teile

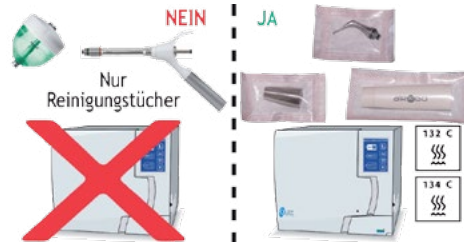


8 - Schmierung der O-Ringe nach der Sterilisation



BEI UNDICHTEN STELLEN: Zustand der O-Ringe kontrollieren



9 - Sprayaustritt kontrollieren

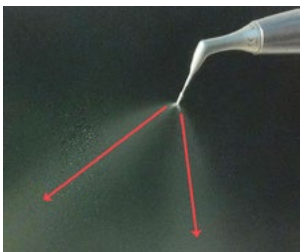

TIPPS BEI VERSTOPFUNG

	Pulver	Zusammensetzung	Leichte oder starke Verstopfung
PERIO		Glyzin	 + 10 Min. Reinigung der verstopften Teile in polarem Lösungsmittel mit Ethanol (z.B. Listerine®) im Ultraschallbad Videos auf Youtube: https://www.youtube.com/ACTEONGermanyGmbH