



VORBEREITUNG

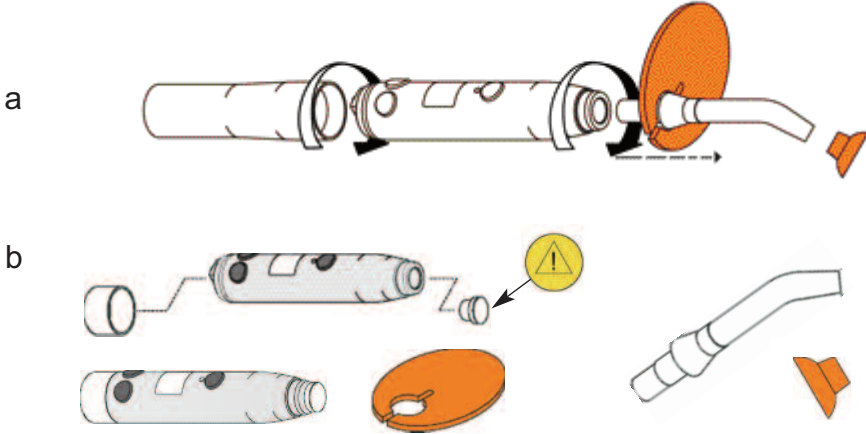

REINIGUNG

REINIGEN UND STERILISIEREN

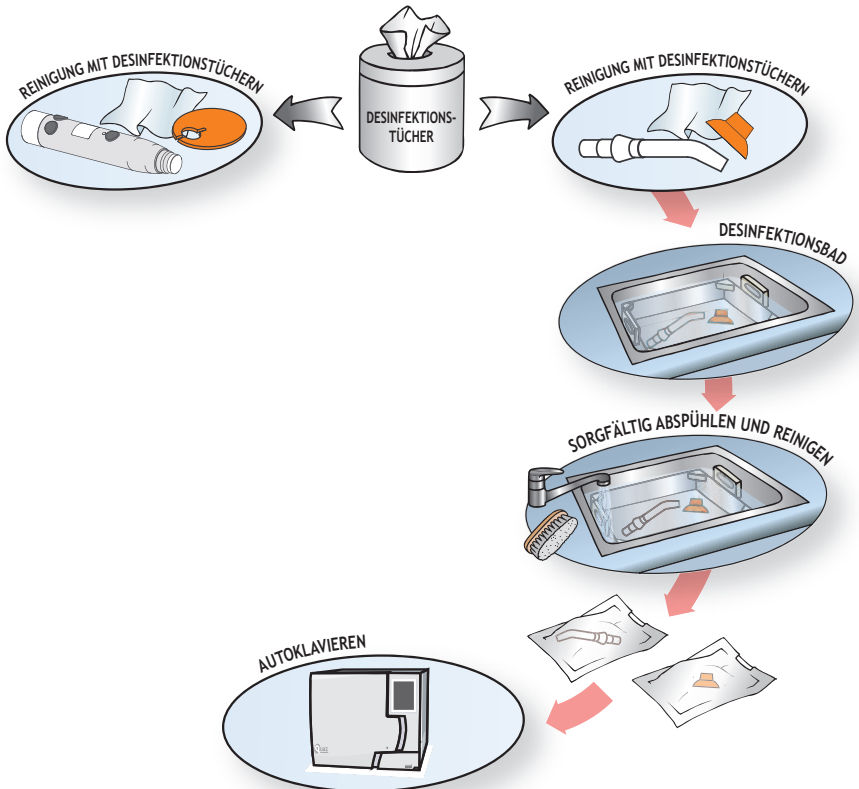



HINWEIS

Vor erstmaligem Gebrauch:

- Akku aufladen (ausser OEM)
- Sterilisieren Sie den Lichtleiter
- Entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappen vom Handstück und **bewahren Sie die Schutzkappen für die spätere Reinigung auf**

Reinigungshinweise:

Zur Reinigung des Handstücks sowie der Ladestation beachten Sie bitte folgendes:

- Lösen Sie den Akku vom Handstück
- Entfernen Sie den Lichtleiter und sterilisieren Sie ihn
- Setzen Sie die Schutzkappen auf das Handstück
- Benutzen Sie ein weiches Tuch mit pH-neutralen Desinfektionsmittel zur Reinigung des Handstücks und der Ladestation
- Verwenden Sie niemals Sprays direkt auf das Handstück oder die Ladestation; ätzende Flüssigkeiten könnten ins Innere gelangen und diese beschädigen. **Berühren Sie nicht die Kontakte.**
- Trocknen Sie den Lichtleiter sorgfältig ab, bevor Sie ihn wieder in das Handstück einsetzen.

Benutzen Sie kein ammoniakhaltiges Desinfektionsmittel!